



מדריך למשתמש Clover Book Lite



שימו לב

לפני שימוש ראשון, אנא טענו את המכשיר



הקפידו להניח את המכשיר במקום שהטמפרטורה שלו אינה חורגת מ 10° מינימום ו 35° מקסימום.



הרחיקו את המכשיר מאזורים לחים ואזורים החשופים לרטיבות.



אל תנסו לתקן את היחידה בעצמכם. כל ניסיון לתיקון המכשיר על ידי אדם בלתי מורשה יבטל את אחריות המוצר.



לפרטים אנא צרו קשר איתנו **09-9529366**.

אנא השתמשו בספק הכוח והסוללה המסופקים עם המכשיר.



סקירה כללית

Clover Book הוא טמ"ס נישא בגודל 12.5 אינץ אשר מספק את כל דרישות הקריאה היומיומיות בבית, בעבודה ובלימודים לאנשים בעלי ראייה ירודה.


מבנה הטמ"ס ועיצוב ידית ההרמה הופכים את המכשיר לקומפקטי להובלה ולנשיאה לכל מקום. לאחר הגדרה מהירה, הוא הופך למכשיר שולחני עם מסך מגע ותצוגה גדול ומספק שטח קריאה וכתיבה נוח.

מערכת המצלמות המרובות מבטיחה איכות תמונות מעולה וחדות עם הגדלה רציפה של פי 1-60. הפעלת הכפתורים הפיזיים ומחוות מסך המגע עם משוב שמע ורטט נתמכות כך שניתן לבחור את האינטראקציה הנוחה ביותר לפי העדפתכם.


המכשיר מחזיק בכל הפונקציות הבסיסיות והמעשיות, המאפשר לך לקרוא, לשנות צבע, לצלם תמונות. לנווט בזמן אמת, לקרוא בעזרת קו מנחה ועוד תכונות רבות ושימושיות...

תאור המכשיר

1. מסך מגע LCD
2. כפתור תפריטים/יציאה
3. כפתור שינוי צבעי תצוגה
4. ג'ויסטיק
5. שינוי גודל תצוגה
6. כניסה למצב הקראה
7. משטח עבודה

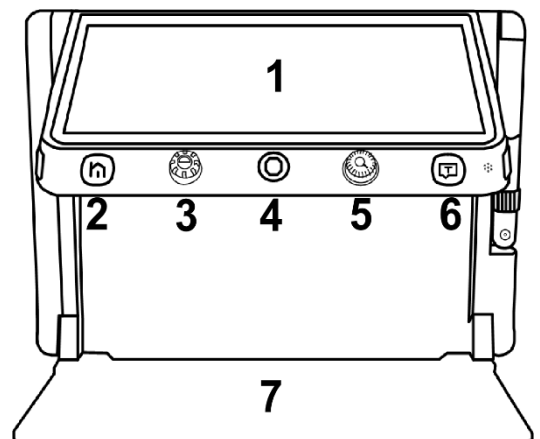


8. כפתור הדלקה
9. כניסת חיבור מטען
10. שקע כניסת HDMI
11. שקע יציאה HDMI
12. שקע USB

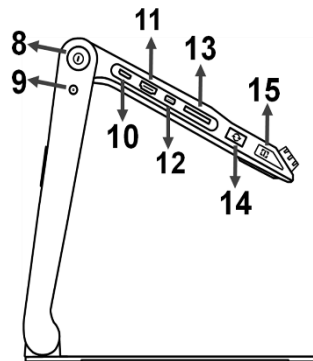


13. חריץ לכרטיס זיכרון SD
14. כפתור החלפת מצלמות
15. כפתור התמצאות בדף



- 16. כניסת אצניות
- 17. כפתור ווליום מעלה
- 18. כפתור ווליום מטה
- 19. כפתור שליטה בפוקוס
- 20. כפתור הקפאת תמונה

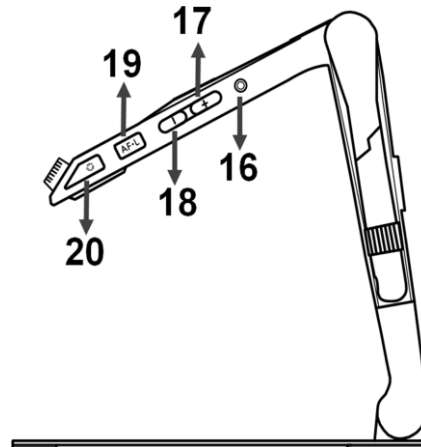


- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21. רמקול | 22. ידית נשיאה | 23. בית הסוללה |
| 24. כפתור נעילה | 25. תאורת לד | 26. מצלמה ראשית |
| 27. זרוע מצלמה | 28. כפתור כיוון | 29. מצלמת מרחק |

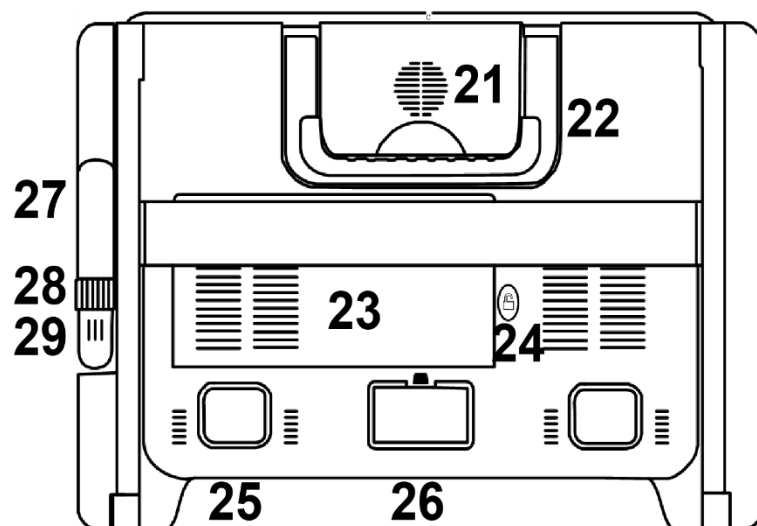





תוספים

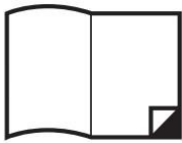

כבל HDMI

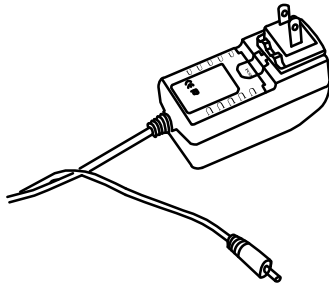

ספק כוח

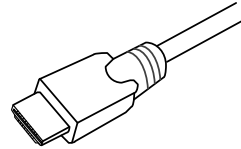

מדריך למשתמש




מטלית לניקוי תיק נשיאה



פתיחת מכשיר



חבר את ספק הכוח המסופק לשקע הטעינה של המכשיר וחבר את מתאם החשמל לשקע חשמל כדי להתחיל בטעינה.

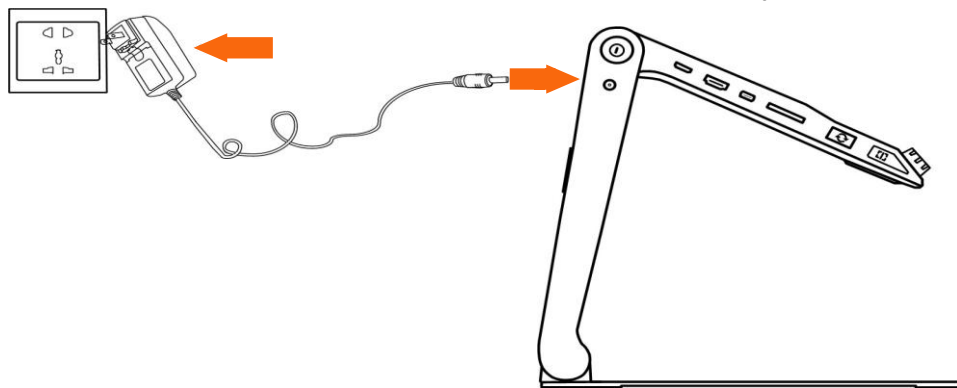

נורית חיווי – ממוקמת בלחצן הדלקה

- טעינה כאשר המכשיר כבוי, נורית החיווי תהיה ירוקה ותכבה אוטומטית כשהסוללה טעונה במלואה. טעינה מלאה תארך כ-3 שעות ותתמוך ביחידה בעבודה רציפה במשך 4-5 שעות.
- טעינה כשהמכשיר דולק, נורית החיווי תישאר ירוקה.
- כאשר המכשיר דולק ללא טעינה, נורית החיווי תהיה ירוקה, כאשר רמת הסוללה תרד היא תיהפך לאדום. כאשר נורית החיווי האדומה מתחילה להבהב, זה אות לטעון את הסוללה.

כפתורים וסרגלים

	לחיצה 3 שניות - הדלקה/כיבוי לחיצה קצרה – הצגת מצב סוללה
	לחיצה קצרה – כניסה/יציאה סרגל תפריט לחיצה ארוכה – כניסה להגדרות מכשיר
	סיבוב ימינה/שמאלה – שינוי צבעים לחיצה על הכפתור – תצוגת צבעים
	צידוד ימינה, שמאלה, למטה ולמעלה
	הגדלה/הקטנה לחיצה קצרה – התמצאות ומעבר לאזור הגדלה אחר. מחוות מגע.
	לחיצה קצרה - כניסה למצב OCR לחיצה ארוכה – תצוגה של A4 יציאה ממצב זה –  או 
	מעבר בין מצלמות – קרוב/רחוק
	לחיצה קצרה - הקפאת תמונה לחיצה ארוכה – הקפאה והצגת סרגל הוספת תווית קולית.

תשר געש

פתרונות ראייה מתקדמים



הוספת קווים/תיחום בתצוגה לחיצה והזזת הג'ויסטיק תשנה את מיקום הקווים והתיחום.	
נעילה ושחרור פוקוס אוטומטי	AF•L
סרגל תפריט הגדרות מהיר – מסך מגע	
ניגודיות – מחוות מגע	
בהירות – מחוות מגע	
סרגל הוספת תווית קולית לתמונה/הפעלה/השהיה של ההקראה.	

מצבי תצוגת מצלמות



חיבור מסך נוסף

