



מדריך למשתמש



CloverNote



שימו לב

לפני שימוש ראשון, אנא טענו את המכשיר



הקפידו להניח את המכשיר במקום
שהטמפרטורה שלו אינה חורגת מ 10° מינימום ו
 35° מקסימום.



הרחק את המכשיר מאזורים לחים ואזורים
החשופים לרטיבות.



אל תנסה לתקן את היחידה בעצמך. כל ניסיון
לתיקון המכשיר על ידי אדם בלתי מורשה יבטל
את אחריות המוצר.



אנא השתמש בספק הכוח והסוללה המסופקת




לפרטים אנא צור קשר איתנו: **09-9529366**




09-9529366

כפתורים ולחצנים

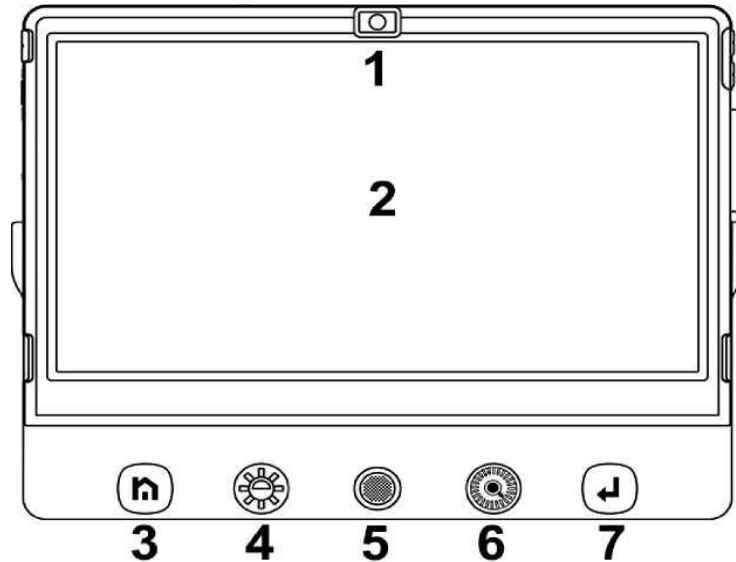

1. מצלמה קדמית	2. מסך LCD	3. כפתור בית/יציאה	4. שינוי צבעי תצוגה
5. ג'ויסטיק	6. שינוי גודל תצוגה	7. כפתור פעולה/אנטר	

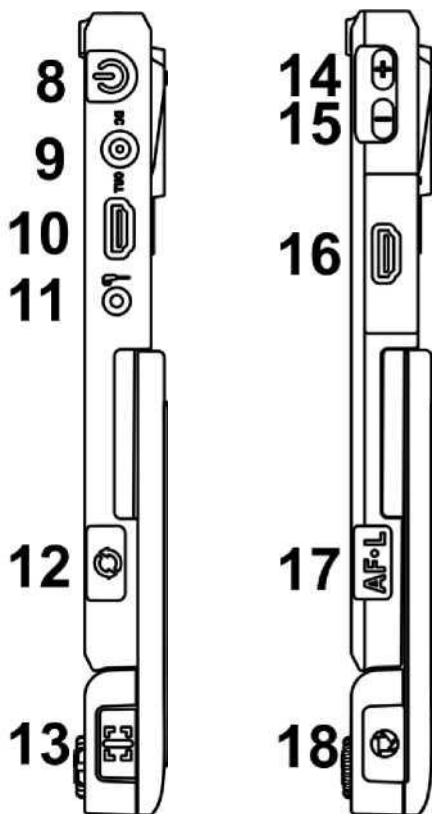


8. כפתור הדלקה/כיבוי	14. הגברת עצמת קול
9. שקע טעינה	15. הנמכת עצמת קול
10. שקע יציאת HDMI	16. שקע למצלמה משנית
11. שקע אזניות	17. הפעלה/כיבוי פוקוס אוטומטי
12. החלפת מצלמות	18. הקפאת תמונה
13. קווי סימון	19. חריץ לכרטיס זכרון SD





09-9529366

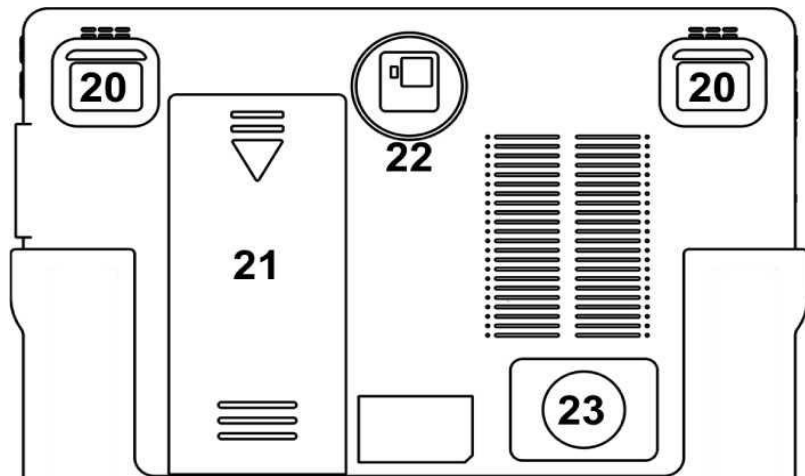

20. נורות לד	21. סוללה	22. מצלמה ראשית
23. רמקול	24. רגלית	


הפעלת ה CloverNote

פתח את הרגלית ומקם את המכשיר על משטח ישר.





חבר את ספק הכוח המצורף לשקע הטעינה של המכשיר, ולאחר מכן חבר את התקע לשקע החשמל

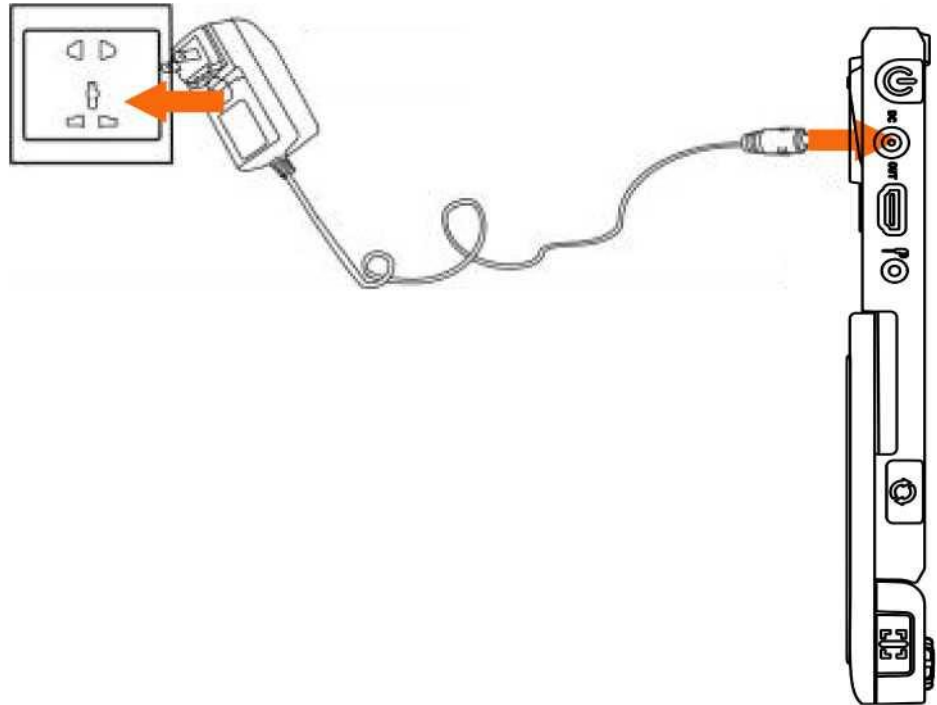

נורת כפתור הפעלה

מצב טעינה כשהיחידה כבויה, נורית ההפעלה תהיה ירוקה ותכבה אוטומטית כאשר היא הסוללה תטען במלואה.
טעינה מלאה תארך כ-2.5 שעות ותתמוך בעבודה עם המכשיר ל-4-4.5 שעות.
במצב טעינה כשהיחידה פועלת, נורית ההפעלה תישאר ירוקה.
כאשר המכשיר פועל ללא חיבור חשמל, נורית ההפעלה תהיה ירוקה.
כאשר הסוללה תתרוקן, הנורית תהפוך אדומה.



תפעול המכשיר

כפתור הדלקה/כיבוי

- לחץ והחזק את לחצן ההפעלה או למשך 3 שניות כדי להפעיל את היחידה.
- כשהמכשיר מופעל, לחץ על לחצן ההדלקה כדי לבדוק את המצב הנוכחי של קיבולת הסוללה.
- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המכשיר פועל למשך 3 שניות כדי לכבות

כפתור בית/יציאה

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור בית/יציאה כדי להיכנס למסך היישומים הכולל את יישום ההגדלה (Magnifier), מנהל המסמכים והתמונות (Open) והגדרות המכשיר (settings). הפריט הנבחר יודגש. בחר את האפשרות הנבחרת בעזרת מסך המגע.

הגדלה

- סובב את כפתור ההגדלה עם כיוון השעון כדי להגדיל.
- סובב את כפתור ההגדלה נגד כיוון השעון כדי להקטין.
- בנוסף לכפתור ההגדלה, השתמש במחוות הצביטה כדי לשנות את רמת ההגדלה.

טווח הגדלה: 2.2-50

בהירות

לחץ לחיצה קצרה על כפתור הבית/יציאה כדי להקפיץ את סרגל הבהירות. הקש כדי לבחור בסמל למטה או השתמש בג'ויסטיק.



החלק באצבע (או סובב את כפתור ההגדלה) כדי לשנות את בהירות המסך. במידה ואין פעולה במשך 5 שניות, לחץ בקצרה על לחצן הבית/יציאה או הקש על האזור לא פעיל כדי לסגור.

שינוי צבעי תצוגה

- מצב צבע הוא שילוב צבעים מוגדר מראש. מצב צבעוני מתאים לצפייה בתמונות או מפות.
 - מצב שילובי צבעים מוגדרים מראש שיכולים לעזור לקריאה ברורה וקלה יותר.
 - סובב את לחצן הצבע המשופר כדי לעבור על כל הצבע המשופר.
 - לחץ על כפתור שינוי צבעי תצוגה כדי לעבור בין מצב צבעוני לשילוב הצבע המשופר האחרון שנבחר.
 - לחץ והחזק את כפתור שינוי צבעי תצוגה למשך 5 שניות כדי להיכנס למסך הצבעים המוגדרים, השתמש במחוות הקשה כדי להפעיל/לבטל את שילוב הצבעים או השתמש בג'ויסטיק כדי לבחור ובכפתור Enter כדי לאשר.
 - הקש על סמל היציאה כדי לצאת ממסך הצבעים או לחץ על כפתור הבית/יציאה.
- הערה: ניתן להיכנס לדף הצבעים גם דרך תפריט ההגדרות.



09-9529366


החלק באצבע (או סובב את כפתור ההגדלה) כדי לשנות את בהירות המסך.
במידה ואין פעולה במשך 5 שניות, לחץ בקצרה על לחצן הבית/יציאה או הקש על האזור לא פעיל כדי לסגור.

שינוי צבעי תצוגה

- מצב צבע הוא שילוב צבעים מוגדר מראש. מצב צבעוני מתאים לצפייה בתמונות או מפות.
 - מצב שילובי צבעים מוגדרים מראש שיכולים לעזור לקריאה ברורה וקלה יותר.
 - סובב את לחצן הצבע המשופר כדי לעבור על כל הצבע המשופר.
 - לחץ על כפתור שינוי צבעי תצוגה כדי לעבור בין מצב צבעוני לשילוב הצבע המשופר האחרון שנבחר.
 - לחץ והחזק את כפתור שינוי צבעי תצוגה למשך 5 שניות כדי להיכנס למסך הצבעים המוגדרים, השתמש במחוות הקשה כדי להפעיל/לבטל את שילוב הצבעים או השתמש בג'ויסטיק כדי לבחור ובכפתור Enter כדי לאשר.
 - הקש על סמל היציאה כדי לצאת ממסך הצבעים או לחץ על כפתור הבית/יציאה.
- הערה:** ניתן להיכנס לדף הצבעים גם דרך תפריט ההגדרות.

ניגודיות צבעים

- ברוב המקרים, ניתן להתאים הצבעים השונים. בנוסף, ניתן לשנות עוד את הניגודיות באופן ידני.
- לחץ והזז על כפתור הצבע או סובב את כפתור ההגדלה בו-זמנית כדי לפתוח את סרגל בקרת הניגודיות.

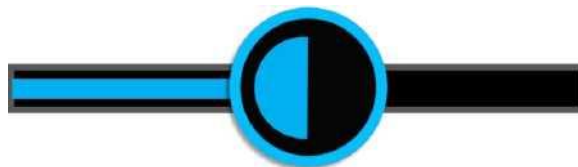

- השתמש בתנועת ההחלקה או סובב את כפתור ההגדלה כדי לשנות את הניגודיות.
- במידה ואין פעולה במשך 5 שניות תתבצע יציאה מהמסך או לחיצה קצרה על מקש הבית.

תאורה - נוריות

- במצב הגדלה, לחץ בקצרה על כפתור הבית/יציאה.
- בסרגל הבקרה ניתן לשלוט במצב הנוריות.
- השתמש בהקשה על הסמל הספציפי כדי לשלוט על.



- במידה ואין פעולה במשך 5 שניות תתבצע יציאה מהמסך או לחיצה קצרה על מקש הבית.
- במידה ואין פעולה במשך 5 שניות תתבצע יציאה מהמסך או לחיצה קצרה על מקש הבית.

עוצמת קול

לחץ על כפתור עוצמת הקול למעלה או עצמת הקול למטה כדי לכוון את עוצמת הקול. כשהסרגל מופיע, תוכלו גם להחליק כדי לשנות את עוצמת הקול.



כפתור/סרגל עוצמת קול



כפתור סרגל (OCR) עוצמת קול ההקראה

הקפאת תמונה



09-9529366

הקפאת תמונה יכולה להיות שימושית עבור תמונה מסוימת, הגדלה נוספת כמו גם שינויי צבע עדיין זמינים במצב זה.

לחץ על כפתור ההקפאה כדי להקפיא/לבטל את הקפאת התמונה.

שמירת תמונות

במצב הגדלה, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הקפאת תמונה למשך 3 שניות כדי לאחסן את התמונה הנוכחית.

הערה: כאשר התמונות השמורות מגיעות לקיבולת המקסימלית (GB 2, סמל זיכרון מלא יופיע), יש למחוק כמה תמונות תחילה לפני השמירה הבאה.

קווי סימון

לחץ על כפתור קווי סימון כדי לעבור בין קווי סימון שונים במצבי קו ומיסוך. פונקציית הצידוד עדיין זמינה.

כאשר קו סימון שורת הקריאה פעיל, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור קווי סימון וסובב את כפתור שינוי צבעי תצוגה כדי לשנות את צבע הקו.

קו סימון אופקי

לחץ והחזק את כפתור קווי סימון והחלק את הג'ויסטיק למעלה/מטה כדי לשנות את המיקום של קו סימון הקריאה האופקי, החלק את הג'ויסטיק שמאלה/ימינה כדי להקטין/להגדיל את רוחב הקו

קו סימון אנכי

לחץ והחזק את כפתור קווי סימון והחלק את הג'ויסטיק למעלה/מטה כדי לשנות את המיקום של קו סימון הקריאה האנכי, החלק את הג'ויסטיק שמאלה/ימינה כדי להקטין/להגדיל את רוחב הקו

מיסוך אופקי

לחץ והחזק את כפתור קווי הסימון והחלק את הג'ויסטיק למעלה/מטה כדי לשנות את מיקום המיסוך, החלק את הג'ויסטיק שמאלה/ימינה כדי לצמצם/להגדיל את המיסוך.

מיסוך אנכי

לחץ והחזק את כפתור קווי הסימון והחלק את הג'ויסטיק למעלה/מטה כדי לשנות את מיקום המיסוך, החלק את הג'ויסטיק שמאלה/ימינה כדי לצמצם/להגדיל את המיסוך.

אפשרות התמצאות בדף

כאשר אתה ברמת הגדלה גבוהה, פונקציית אפשרות ההתמצאות/המיקום מתוכננת כדי לעזור במיקוד ההגדלה בדף ובהעברת אזור מיקוד המצלמה למיקום אחר בדף שבו אתה מעוניין.

לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההגדלה והתמונה תקטן עד להגדלה המינימלית כאשר תיבת המיקום תופיע ונגלה את מיקום ההגדלה בדף שקראת.

השתמש בתנועת גרירה החלקה עם האצבע כדי לשנות את המיקום של התיבה.

הקש שוב על כפתור ההגדלה כדי להגדיל את המיקום החדש

כיווט/צידוד תמונה

ברמת זום גבוהה, השתמש במחוות ההחלקה או השתמש בג'ויסטיק כדי לנווט במסך ולראות את כל אזור ההגדלה מהמצלמה מבלי להזיז את חומר הקריאה.

שינוי מהירות צידוד

הסט את הג'ויסטיק לכל כיוון וסובב את כפתור ההגדלה סימולטנית כדי להקפיץ את סרגל מהירות הצידוד.



○ השתמש במחוות ההחלקה או סובב את כפתור ההגדלה



09-9529366

- כדי להאיץ/להאיט את מהירות התנועה.
- במידה ואין פעולה במשך 5 שניות תתבצע יציאה מהמסך או לחיצה קצרה על מקש הבית.

מיקום התמונה במסך

הקש במהירות על מרכז המסך פעמיים כדי למרכז מחדש את התמונה למרכז הקש במהירות פעמיים בשולי המסך למעבר מהיר של התמונה מצד לצד.

שליטה בפוקוס

ישנן כמה שיטות לשליטה בפוקוס/מיקוד.

- לחץ על המסך עם אצבע אחת למשך 2 שניות כדי להפעיל את המיקוד באופן ידני או לחץ לחיצה ארוכה על מתג הפעלה/כיבוי פוקוס אוטומטי למשך 2 שניות.
- לחץ על מתג הפעלה/כיבוי פוקוס אוטומטי כדי להפעיל/לבטל את הפוקוס האוטומטי.
- השבתת הפוקוס האוטומטי שימושי במיוחד עבור כתיבה כדי למנוע תפיסת מיקוד ביד או בעט.

○ החלפה בין מצלמות

מצבי צפיה במצלמות המובנות

כשהרגלית פתוחה/סגורה, המכשיר יעבור אוטומטית בין תצוגת מצלמה לקרוב/מסמך לבין מצלמה למרחק.

- באפליקציית ההגדלה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור הבית/יציאה כדי לפתוח את סרגל הבקרה.
- בסרגל הנפתח הקישו על סמל המצלמה במרכז כדי להפעיל את מצלמת הסלפי.

מצב תצוגת מסמך/מרחק.

מצב צפייה במצלמה המשנית. (אופציונלי)

- כשהמצלמה החיצונית המשנית מחוברת למכשיר, לחץ על כפתור החלפת המצלמות למעבר בין המצלמה המשנית למצלמת הראשית.
- בתצוגת עמוד מלא/מסמך, הקש קצרה על כפתור Enter כדי לסובב את תצוגת המסך או לחץ על לחצן הבית/יציאה כדי להקפיץ את סרגל הבקרה.
- ניתן להפעיל/לכבות את נורית ה-LED של המצלמה מסרגל הבקרה. ברמת הגדלה מינימלית, לחץ על כפתור ההגדלה בלחיצה הראשונה, המיקוד יתקרב כדי להשיג יישור רוחב העמוד ויסיר את הקצוות השחורים. לחץ שוב על כפתור ההגדלה כדי להציג את מיקום הגדלת המצלמה.



09-9529366

מצלמה משנית – מצב מרחק

מצלמה משנית – מצב כתיבה



ניהול תמונות/מסמכים (Open)

ישנן שתי אפשרויות ביישומים.

כאשר כרטיס ה-SD החיצוני אינו מוכנס למכשיר, רק סמל הזיכרון הפנימי זמין (Memory).

כאשר כרטיס ה-SD החיצוני מוכנס, הזיכרון הפנימי וכרטיס ה-SD החיצוני זמינים.



הקש או סובב את כפתור שינוי צבעי תצוגה כדי לעבור בין שתי האפשרויות.

- ניתן להעביר תמונות ומסמכים מהזיכרון הפנימי לכרטיס ה-SD החיצוני כשהוא מוכנס. יש לבחור תחילה את התמונה/מסמך הספציפיים ולאחר מכן הקש על העבר או לחץ על כפתור הקפאת תמונה כדי לבצע את העברה.
- ניתן להעביר תמונות ומסמכים מכרטיס ה-SD לזכרון המכשיר התמונות והמסמכים יישמרו בתיקיות המשותפות של המסמכים והתמונות בהתאם. בחר תחילה את התמונה/מסמך הספציפיים ולאחר מכן הקש על העבר או לחץ על כפתור הקפאת תמונה כדי לבצע את העברה.
- הקשה ארוכה על סמל העבר או לחיצה ארוכה על כפתור הקפאת תמונה למשך 3 שניות, התמונה/המסמך ייבחרו ויועברו בין כרטיס ה-SD והמכשיר.
- כאשר בחירה מרובה מופעלת, ניתן להעביר כמה תמונות/מסמכים נבחרים בבת אחת על ידי הקשה על סמל ההעברה או לחץ על כפתור הקפאת תמונה כדי להקפיץ תיבת אישור לביצוע ההעברה.



09-9529366

בחירה מרובה

- בגלריית התמונות, הקש ארוכות על התמונה/מסמך הספציפיים (או לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-Enter כדי להפעיל/לבטל את הבחירה המרובה).
- כאשר בחירה מרובה מופעלת, תיבה קטנה תופיע בפינה הימנית התחתונה של כל תמונה. הקש שם או השתמש בג'ויסטיק ולחץ על כפתור Enter כדי לבחור את כל התמונות/מסמכים ביעד.
- הקש על סמל האשפה, כדי לאשר מחיקה/העברה של כל התמונות/מסמכים שנבחרו.
- הקש על כפתור יציאה כדי לצאת מהבחירה המרובה.

פתיחת תמונות

- כאשר נכנסים לתפריט Open מדף הבית, הקש על סמל התמונות (Picture) כדי להיכנס לגלריית התמונות. העיון בגלריה מתבצע בעזרת פס ההחלקה בצד ימין של המסך.
- הקש כדי לסמן את התמונה והקש עליה שוב (או לחץ על כפתור Enter) כדי לפתוח את התמונה. התמונה ממוזערת עם תווית קול יכולה להשמיע את הקול המוקלט על ידי הקשה על סמל הקול בצד ימין למעלה (או לחץ מטה על כפתור ההגדלה)..

מחיקת תמונות

- כאשר נמצאים בגלריה, בחרו את התמונה שברצונכם למחוק והקשו על סמל האשפה, הקש שוב על סמל האשפה כדי למחוק או כל כפתור מיקום אחר על המסך כדי לבטל.
- בגלריה, הקש על סמל האשפה למשך 5 שניות כדי למחוק את כל התמונות

פתיחת מסמכים

- כאשר נכנסים ליישום Open מדף הבית, הפעל את סמל המסמכים (Shared Documents) כדי להיכנס לגלריית המסמכים. העיון בגלריה בעזרת פס ההחלקה בצד ימין של המסך.
- כאשר נמצאים בגלריית המסמכים, ניתן לבצע את ההעברה והמחיקה של הקבצים.
- ניתן להקריא טקסט ממסמכי PDF ו-TXT, הקש על שורה בטקסט והקש עליו שוב (או לחץ על כפתור Enter) כדי להשמיע או לעצור את ההקראה.
- הערה: המכשיר תומך בהקראה בשפות לועזיות ברבד לעת עתה.

פורמט טקסט TXT

- אם לקובץ ה-txt יש תוכן ארוך, הוא יתחלק אוטומטית לדפים. הקש על כפתור הבית/יציאה כדי להקפיץ את סרגל הבקרה והקש על סמלי החיצים כדי לעבור למעלה/למטה בקובץ.
- לחץ על כפתור הבית/יציאה כדי להקפיץ את סרגל הבקרה. הקש על סמל ההפעלה (או לחץ על כפתור Enter) כדי להתחיל לקרוא. הקש על סמל השהה (או לחץ על כפתור Enter) כדי להשהות את הקריאה.
- הקש על כפתור A בכדי לשנות את גודל הטקסט.
- לחץ על כפתור בית/יציאה ליציאה מהחלון.
- לחץ על סמל הפרצוף המדבר, לאפשר או לבטל את הדיבור.

פורמט טקסט PDF

- הקש על כפתור הבית/יציאה להקפיץ את סרגל הבקרה, הקש על סמלי החיצים למעבר קדימה ואחורה בטקסט.
- הקש על סמלי החיצים הכפולים למעבר לתחילת הטקסט ולסופו.
- במידה וקובץ ה-PDF מכיל טקסט, הקש על סמל ה-T להתחלת הקראה.



09-9529366

- הקש על סמל היציאה ליציאה מהגלריה.
- הערה: קבצי התמונות והמסמכים תומכים במערכת קבצים Fat32 בלבד.
- הערה: הקשה מהירה על כפתור החלפת מצלמות, למעבר מהיר למצב תצוגה רגילה

תפריט הגדרות

הכנס לתפריט ההגדרות מתוך דף הבית על ידי לחצה ארוכה על כפתור בית/יציאה.

Option Page	Voice Setting Page	Factory Setting Page
		
אפשרויות כלליות	הגדרות קול	הגדרות יצרן

אפשרויות כלליות

- שילוב מצבי צבע מספק את 16 שילובי הצבעים השונים המובנים במכשיר. אלו שילובי צבעים שהמשתמשים יכולים להתאים אישית לפי העדפתם.
- חיסכון בחשמל מספק אפשרות שהמכשיר יכנס למצב שינה כאשר אין פעולה למשך 5 דקות ולאחר מכן יבבה אוטומטית תוך 15 דקות ללא פעולה.
- מסך מגע מספק אפשרות של שימוש במחוות על המסך.
- הנחיות קוליות מספק אפשרות של הנחיות קוליות עבור פעולות וסטטוסים במכשיר.

הגדרות קול

- Voice Gender בחירת מין הדובר, נותן אפשרות לבחירה בין קול נשי לגברי. ברירת המחדל של היצרן היא קול נשי.
- לאחר שהגדרתם את הקול הגברי או הנשי ניתנת האפשרות למבטאים השונים, למשל אנגלית US או אנגלית UK וב"ו... Language Setting הגדרת שפות הדיבור מספקת אפשרות לבחירת השפות השונות.
- Voice Speed Setting הגדרת מהירות הדיבור מספקת את שלוש מהירות הקול: איטית, בינוני, מהיר.



09-9529366

הגדרות יצרן


System Reset - איפוס המכשיר יכול לעזור לשחזר להגדרות ברירת המחדל של היצרן. יתבצע כיבוי אוטומטי בסיום האיפוס.

Power Frequency - מספק את האפשרויות של HZ50 ו-HZ60 תדר מתח לפי אזור הלקוח.

User Interface - ניתן לבחור בממשק פשוט (ללא אפשרויות יישומים) או סטנדרטי (ברירת מחדל).

שקע יציאת HDMI

ניתן לחבר את המכשיר בעזרת כבל HDMI למסך חיצוני המכיל שקע חיבור HDMI.

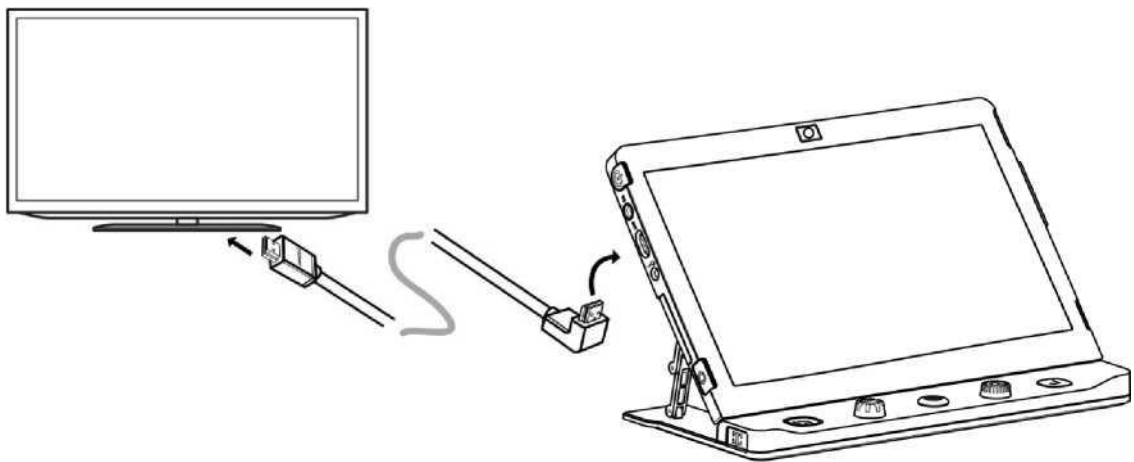

איפוס חומרה

hardware reset - כשהמכשיר קופא או נתקע או שלא ניתן לכבות אותו כרגיל, לחץ על כפתור הדלקה/כיבוי וכפתור הגברת עצמת קול - בו-זמנית כדי להפעיל את איפוס החומרה..



09-9529366

פתרון תקלות

המכשיר אינו נדלק

- חבר למקור חשמל
- טען את המכשיר
- בצע איפוס חומרה Hardware Reset

מסך שחור או מסך לבן

- במידה והמכשיר עומד על משטח חלק ללא טקסט, צבעים או תמונות, המסך עלול להראות שחור או לבן.
- נסו לכוון את ההגדלה
- נסו לכוון את הצבעים השונים
- כבו והדליקו את המכשיר
- בצעו איפוס חומרה - Hardware Reset

התמונה אינה משתנה

- בדקו שהתמונה אינה במצב הקפאת תמונה או במצב של תצוגת TTS
- כבו והדליקו את המכשיר
- בצעו איפוס חומרה - Hardware Reset

כתמים או פגמים במסך

- נסו לשנות את הבהירות/ניגודיות של התמונה
- בעזרת מטלית יבשה נקו את המסך ואת עינית המצלמה

התמונה לא בפוקוס

- בדקו אם הפוקוס האוטומטי מושבת/מופעל
- הזיזו את היד קדימה ואחורה על המסמך שמתחת למכשיר כדי להפעיל את המיקוד
- הקש על המסך למשך 2 שניות כדי להפעיל את המיקוד באופן ידני

בעיות אחרות

- שיחזור לברירות המחדל של היצרן בתפריט
- איפוס חומרה

אנא פנה לתשר געש אם הבעיה לא נפתרה.

12.5 inch IPS touch screen, Screen Resolution: 1920*1080	Display: ●
Ultra HD 4K Camera, Video Resolution: 3840*2160	Camera: ●
Near-view: 2.2x - 50x (Relevant to viewing angle)	Magnification: ●
Nature Color, up to 16 user-defined Enhanced Colors	Color Mode: ●
LCD brightness adjustable	Brightness: ●
Contrast adjustable in Enhanced Color mode	Contrast: ●
Live panning; freeze/stored image panning	Panning: ●
Image Storage, storage capacity: approximately 2GB	Snapshot: ●
Image format: JPG, BMP, PNG Document format: TXT, PDF	Playback: ●
Line / Mask function; Text relocation / Find function	Locate: ●
Button / menu / speech voice control	Audio: ●
Left/right lights On/Off	LED Light: ●
Detachable rechargeable Li battery Pack 4-4.5 hours (relevant to different application) continuous use 2.5 hours full charge time	Battery: ●
Input: 100-240V; Output: 12V/3A	Power Adapter: ●
<= 318*245*24mm (Device folded) <= 318*140*180mm (Device set up)	Dimensions: ●
<= 1105g (Battery included)	Weight: ●